

## Procedimiento de instalación del Nebulizador marca Pari

### Para agregar el medicamento

#### Lávese las manos.


Levante la tapa abisagrada.

#### Vacíe el medicamento recetado

Dentro del vaso del nebulizador


No llene más allá

de la línea máxima de capacidad

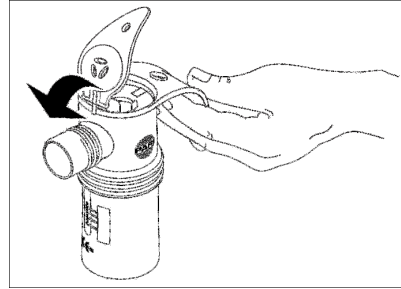

### Si usa la boquilla

Conecte la boquilla a la salida del nebulizador.  
Para que el tratamiento sea más eficaz, cierre la tapa abisagrada. Para que el tratamiento sea más rápido, deje abierta la tapa abisagrada.

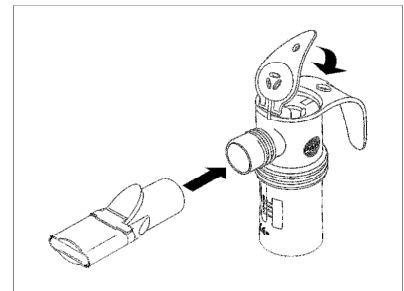

### Si usa una mascarilla

Conecte la mascarilla a la “salida del nebulizador”, como lo muestra la ilustración.  
Para que el tratamiento sea más eficaz, cierre la tapa abisagrada. Para que el tratamiento sea más rápido, deje abierta la tapa abisagrada.

