

Procedimiento de instalación del Nebulizador marca Pari

Para agregar el medicamento

Lávese las manos.



Levante la tapa abisagrada.

Vacíe el medicamento recetado

Dentro del vaso del nebulizador

No llene más allá

de la línea máxima de capacidad

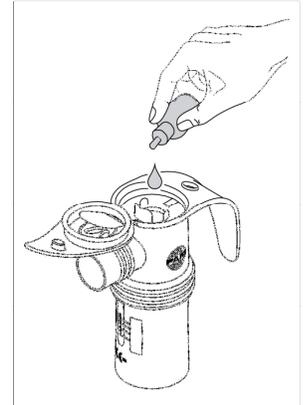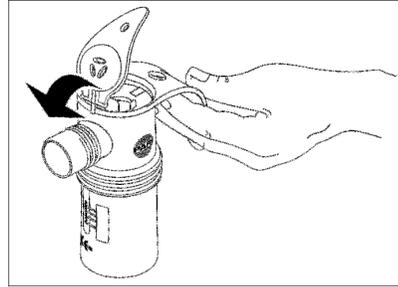

Si usa la boquilla


Conecte la boquilla a la salida del nebulizador.

Para que el tratamiento sea más eficaz, cierre

la tapa abisagrada. Para que el tratamiento

sea más rápido, deje abierta la tapa

abisagrada.

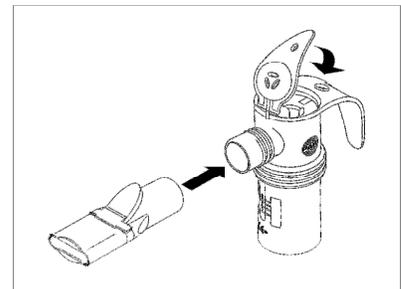

Si usa una mascarilla

Conecte la mascarilla a la “salida del

nebulizador”, como lo muestra la ilustración.

Para que el tratamiento sea más eficaz, cierre

la tapa abisagrada. Para que el tratamiento

sea más rápido, deje abierta la tapa

abisagrada.

